

# МАГИКО<sup>®</sup> Пласти

## Наклей и не болей

• Действует 8 часов •

Для детей  
с 2-х лет



Пластырь  
медицинский  
согревающий

при кашле  
и простуде

Прогревает  
без  
жжения

1  
шт

Наклеить  
на  
одежду

# МАГИКО<sup>®</sup> Пласти

## Наклей и не болей



### ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ СОГРЕВАЮЩИЙ

**Назначение:** «Пластырь медицинский согревающий» применяется при простудных заболеваниях, кашле, переохлаждении и во всех других случаях, когда необходимо длительное тепловое воздействие на организм ребенка. Пластырь оказывает бережное прогревающее действие и избавляет от дискомфорта, связанного с жжением. Пластырь наклеивается поверх белья, не требует дополнительной фиксации, не ограничивает движений, легко снимается, не оставляет пятен на одежде.

Разрешено для детей с 2-х лет.

**Внимание!** Нельзя проводить тепловые процедуры ребенку, если у него температура тела выше 37,5 °C.

**Описание:** Пластырь представляет собой прямоугольный полотняный пакет, заполненный порошкообразной пластырной массой. С одной стороны пакета нанесен клеевой слой, который закрыт съемным защитным покрытием. Пластырь находится в герметичной полимерной упаковке.

**Состав пластырной массы:** Порошок железа, угольный порошок, натрий хлористый, вода дистиллированная, минеральный абсорбент.

**Принцип действия:** После вскрытия герметичной упаковки происходит контакт пластырной массы с воздухом. Пластырь начинает нагреваться в результате реакции окисления веществ, входящих в состав пластырной массы. Через 10-15 минут температура нагрева пластиря достигает +40°C. Возможная максимальная температура нагрева пластиря +45°C.

Согревающее действие пластиря сохраняется в течение 8-ми часов.

**Рекомендации по применению:** Вскройте упаковку непосредственно перед применением! Вскройте полимерный пакет, достаньте пластирь из пакета, удалите с клеевого слоя защитное покрытие и плотно зафиксируйте пластирь липкой стороной поверх хлопкового белья. Пластирь накладывается спереди на грудь, избегая области сердца, или сзади на спину между лопатками. Пластирь наклеивается ребенку только поверх одежды. Для достижения равномерного прогревания белье должно прилегать к телу. Пластирь можно использовать в течение 8-ми часов. Один пластирь применяется только один раз и после использования утилизируется как бытовой отход, повторное применение пластиря не допускается. Нельзя разогревать ранее использованный пластирь, например, в микроволновой печи, в духовке или кипячением. Нельзя применять пластирь с поврежденной упаковкой.

#### Меры предосторожности:

Пластирь предназначен для наружного применения, наклеивается только поверх одежды. Не наклеивайте пластирь непосредственно на кожу! Детям использовать пластирь только под контролем взрослых. Не использовать пластирь при наличии гематом, открытых ран и повреждений кожи, а также в местах, лишенных чувствительности. При возникновении жжения, раздражения или аллергической реакции следует немедленно прекратить использование пластиря и затем проконсультироваться с врачом. Не использовать пластирь при влажной коже или совместно с лосьонами, кремами, мазями и прочими средствами. В случае повреждения полотняной упаковки пластиря и попадания её содержимого на кожу, в рот или глаза немедленно промыть их водой.

**Условия хранения:** Хранить при комнатной температуре, отдельно от пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 3 года.

**Количество пластирей в упаковке:** 1 шт. Размер пластирь: 9,5 x13 см.

**Производство:** "Фошань Аква Гел Биотех Ко., Лтд." Китай,  
(Foshan Aqua Gel Biotech Co., Ltd., Nanzhuang Geely Industrial Park,  
Foshan National Hi-tech Development Zone, Foshan, Guangdong Province, China)  
по заказу ООО "Фармдика"; Россия, 107113, г. Москва,  
Сокольническая пл., д.4А, оф.309.

[www.magicoplast.ru](http://www.magicoplast.ru)

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 466128

Номер партии:

Дата изготовления:

Годен до:

